



JUHISED TEIE AUDIOLOOGILE

Kuidas võtta sobiv kõrvajäljend

Meie eritellimusel silikoonist kõrvaotsikute valmistamiseks on vajalik TÄIELIK KÕRVALOESTA JÄLJEND.

1

Kogu kõrva jäljend

Jäljend PEAB hõlmama kõiki kõrva peamisi osi, sealhulgas kogu heliksit, heliksi säärt, traagust ja traaguse sätku ning antitraagust. Paluge jätta lisamaterjali ka kõrva välimisele osale. Kui jäljendist puuduvad vajalikud osad, võidakse see tagasi lükata.

2

Õige materjal ja kuulmekäigu sügavus

Jäljend tuleb võtta suure viskoossusega silikoonist jäljendmaterjaliga ning see peab ulatuma kuulmekäigu teisest käänakust kaugemale. Kuigi meie eritellimusel kõrvaotsikud ei ulatu teisest käänakust kaugemale, annab sügavam jäljend piisavalt teavet kuulmekäigu kuju kohta, et tagada kindel sobivus esimesest käänakust kaugemal.

3

Avatud suu tehnika

Jäljendi võtmisel tuleb kasutada 25-50 mm hambumusplokki. See aitab piirata lõualuu liikumist materjali kõvenemise ajal ning arvestada kuulmekäigu kuju muutumisega suu avamisel. Avatud suu tehnikaga võetud jäljend annab parema tulemuse tihenduse ja müraisolatsiooni osas.



Palun näidake seda juhendit audioloogile enne jäljendite võtmist.