



OHJEET AUDIOLOGILLESII

Hyväksyttävän korvajäljennöksen ottaminen

Räätälöityjä silikonisia korva-adapttereitamme varten tarvitaan KOKO KORVALEHDEN JÄLJENNÖS.

1 Koko korvan jäljennös

Jäljennöksen TÄYTYY sisältää kaikki korvan tärkeimmät osat, mukaan lukien koko helix, helixin juuri, tragus ja traguksen lovi sekä antitragus. Pyydä jättämään ylimääräistä jäljennösmateriaalia myös korvan ulko-osaan. Jos jäljennöksestä puuttuu tarvittavia osia, se voidaan hylätä.

2 Oikea materiaali ja korvakäytävän syvyys

Jäljennös on tehtävä korkeaviskoosisesta silikonisesta jäljennösmateriaalista, ja sen tulee ulottua korvakäytävän toisen mutkan ohi. Vaikka räätälöidyt korva-adaptterimme eivät ulotu toisen mutkan ohi, syvempi jäljennös antaa riittävästi tietoa korvakäytävän muodosta ja mahdollistaa varman istuvuuden ensimmäisen mutkan jälkeen.

3 Avoimen suun tekniikka

Jäljennöstä otettaessa on käytettävä 25–50 mm:n purentapalaa. Se auttaa rajoittamaan leuan liikettä materiaalin kovettumisen aikana ja huomioimaan korvakäytävän muodon muutoksen suuta avattaessa. Avoimen suun tekniikalla otettu jäljennös antaa paremman tiiviyden ja meluneristyksen.



Näytä tämä ohje audiologillesi ennen jäljennösten ottamista.