



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО АУДИОЛОГА

Как снять подходящий слепок уха

Для изготовления наших индивидуальных силиконовых типов требуется **ПОЛНЫЙ СЛЕПОК УШНОЙ РАКОВИНЫ**.

1

Полный слепок уха

Слепок **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должен включать все основные части уха: полный завиток, ножку завитка, козелок и козелковую вырезку, а также противокозелок. Попросите также оставить дополнительный материал на наружной части уха. Если на слепке отсутствуют необходимые участки, он может быть отклонен.

2

Материал и глубина слухового прохода

Слепок необходимо выполнять из высоковязкого силиконового слепочного материала и заводить материал за второй изгиб слухового прохода. Сами индивидуальные типы не будут заходить дальше второго изгиба, однако такая глубина слепка дает достаточно информации о форме канала для надежной посадки за первым изгибом.

3

Слепок с открытым ртом

Во время снятия слепка необходимо использовать прикусной блок размером 25-50 мм. Он помогает ограничить движения челюсти во время отверждения материала и учесть изменение формы слухового прохода при открывании рта. Техника снятия слепка с открытым ртом обеспечивает лучший результат по герметичности и шумоизоляции.



Покажите эту памятку аудиологу до снятия слепков.